

Portable electric breast pump



Портативный
электрический
молокоотсос



Инструкция
по эксплуатации и уходу

160 ml

Поздравляем с покупкой этого продукта!


Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей молокоотсосов, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Схема молокоотсоса

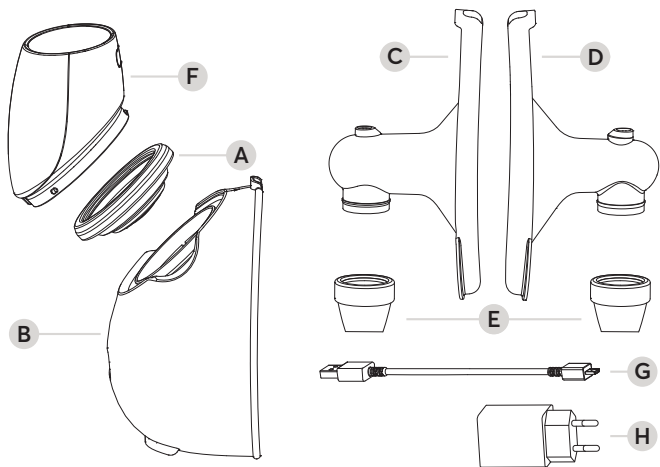

№	Наименование	Материал	Кол-во, шт.
A*	Диафрагма	Силикон	1
B*	Емкость для молока	Полипропилен (PP), термопластичный эластомер (ТПЭ)	1
C*	Насадка для стимуляции притока 24 мм	Полипропилен (PP)	1
D*	Насадка для стимуляции притока 21 мм	Полипропилен (PP)	1
E*	Клапан	Силикон	2
F	Электронный блок	–	1
G	Кабель питания	–	1
H	Адаптер питания	–	1

*Элементы, контактирующие с грудным молоком

Характеристики электронного блока

Модель:	HL-3060
Сетевое напряжение	100-240V, 50/60Hz
Входное напряжение:	5V === 1A
Напряжение аккумулятора:	3.7V ===
Емкость аккумулятора:	2x 600mAh (4.44Wh)
Разъем кабеля питания:	USB Type C
Частота сцеживания:	20–110 раз/мин
Интенсивность сцеживания:	5,3–37,3 кПа (40–280 мм рт. ст.)
Частота стимуляции:	80–160 раз/мин
Интенсивность стимуляции:	2,7–8 кПа (20–60 мм рт. ст.)
Габариты устройства:	107x60x149 мм
Вес устройства:	186 г
Срок службы:	300 циклов разряда/заряда (до 2 лет)
Время зарядки от сети 220В:	≈ 2 часа
Условия эксплуатации и хранения:	помещение с температурой воздуха от +10 до +35°C и влажностью воздуха 50-60%

Меры безопасности

Электронный молокоотсос предназначен для сцеживания и сбора грудного молока. **Внимание!** Не используйте молокоотсос во время беременности без консультации с врачом – сцеживание может вызвать преждевременные роды.

Внимание! Молокоотсос может помочь облегчить боль от избытка молока и длительного застоя. При отсутствии притока молока сцеживание следует продолжать не более 5 минут. Если молоко не приходит или его мало, то стоит пройти медицинское обследование и получить рекомендацию специалиста.


Предупреждение

- Изделие предназначено для одного пользователя.
- Перед первым использованием вымойте и продезинфицируйте все детали молокоотсоса, контактирующие с молоком. Перед обработкой деталей тщательно вымойте руки.
- Мойте все детали, контактирующие с молоком, после каждого использования и дезинфицируйте их перед каждым последующим использованием.
- Для мытья используйте питьевую воду.
- Не используйте антибактериальные или абразивные средства для очистки деталей молокоотсоса.
- Проверяйте перед каждым использованием на наличие повреждений, незамедлительно исключайте из употребления повреждённые изделия.
- Уровень интенсивности сцеживания индивидуален для каждого потребителя.
- Электронный блок не мочить и не погружать в воду, не подвергать его воздействию повышенных температур и прямых солнечных лучей.
- Избегайте короткого замыкания.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы. Неиспользуемые части изделия беречь от детей. Не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.

Предостережения по использованию литий-ионных батарей:

- Не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте выше 60°C и не сжигайте устройство. Не используйте его вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Существует потенциальный риск возгорания, взрыва и ожогов.
- Продукт не должен подвергаться воздействию воды или быть погруженным в воду, так как это может вызвать отказ внутренней системы защиты и функций, что приведет к непредвиденным химическим реакциям, вызывающим нагрев, дым, деформацию или ожоги.
- Изделие содержит несъемную батарею. Данный продукт и батарея должны быть утилизированы в профессиональном центре по переработке; не выбрасывайте их в бытовой мусор.
- Устройство не должно подключаться к источникам питания с превышением рекомендованных параметров.
- USB-кабель, используемый с этим электронным продуктом, должен регулярно проверяться на наличие повреждений кабеля, штекера, корпуса и других частей. В случае обнаружения повреждений кабель следует заменить.
- Молокоотсос необходимо заряжать с помощью рекомендованного адаптера (DC 5V1A). Использование перегруженного источника питания может повредить или сжечь батарею. Не заряжайте продукт более 24 часов.
- USB-кабель для зарядки не является игрушкой. Неправильное использование USB-кабеля для зарядки может привести к электрическому удару.

Описание панели

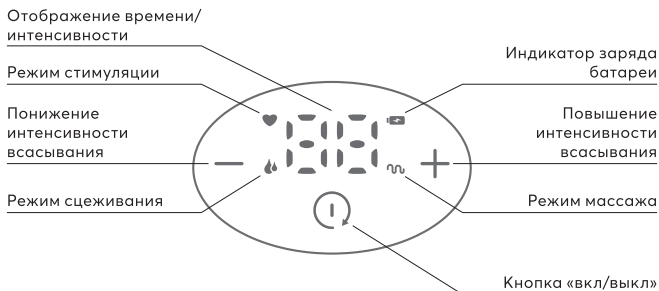

 Кнопка «вкл/выкл»: Долгое нажатие - включения и выключения электронного блока; Короткое нажатие - Выбор режима работы (стимуляция, сцеживание, массаж).

Выбор режима – переключение между режимами работы:

♥ Режим стимуляции. Доступно 9 уровней интенсивности.

🔥 Режим сцеживания. Доступно 9 уровней интенсивности.

🌊 Режим массажа. Доступно 9 уровней интенсивности.

При выборе режима интенсивность равна 0.


 Регулировка интенсивности - выбор мощности всасывания. Нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить мощность всасывания на 1 уровень. Максимально комфортный уровень можно подобрать в процессе работы, регулируя интенсивность.

Сборка молокоотсоса

Подготовка прибора к работе


Простерилизуйте в течение 5 минут все контактирующие с грудью и грудным молоком детали молокоотсоса перед первым и перед каждым последующим использованием. Перед обработкой деталей тщательно вымойте руки. Мойте все контактирующие с грудью и грудным молоком детали после каждого использования.

Предупреждение! Будьте осторожны, детали могут быть горячими. Начинайте сборку молокоотсоса только после того, как детали остыли и высохли.

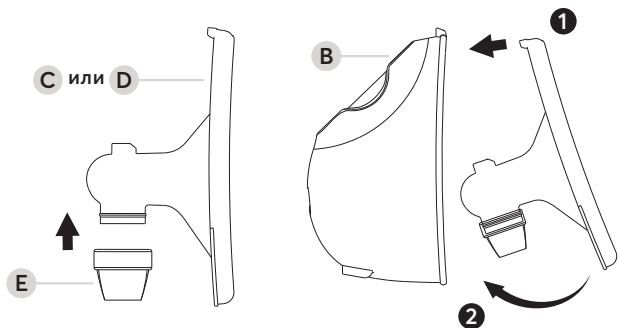

Выберите насадку для стимуляции (24 или 21 мм), вставьте клапан в разъем и прижмите его до конца, чтобы обеспечить надежное соединение.

Вставьте собранную насадку в ёмкость для молока. Сперва вставьте верхнюю часть, затем защёлкните нижнюю, как показано на рисунке.

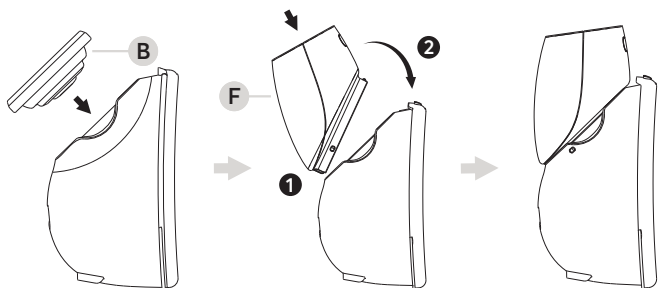

Вставьте диафрагму в верхнюю часть ёмкости для молока. Вставьте на место установленной диафрагмы сперва нижний выступ электронного блока, затем верхний. Надавите на блок, чтобы закрепить конструкцию. Сборка завершена.

Использование

Подключение к электрической сети, зарядка аккумулятора устройства

Подключите кабель питания к адаптеру, другой конец кабеля к электронному блоку. Включите в розетку.

Важно! Используйте только адаптер, входящий в комплект. Убедитесь, что его напряжение соответствует напряжению сети (100-240V 50/60Hz).

Перед использованием молокоотсоса

- Тщательно вымойте руки с мылом прежде, чем прикасаться к груди и деталям молокоотсоса. Вытрите руки чистым одноразовым бумажным полотенцем.
- Рекомендуется занять удобное положение и расслабиться.

- Использование подставки для ног и поднятие ног помогает поддерживать правильную осанку и уменьшает нагрузку на поясницу.
- Расположите собранный молокоотсос (с накладкой для груди) по центру соска и плотно прижмите к груди.

Работа в режиме стимуляции / сцеживания / массажа

- Удерживайте кнопку (I) для включения устройства. После включения устройство автоматически переходит в режим стимуляции на уровне 1. Через 2 минуты оно автоматически переключится в режим сцеживания. Во время работы на экране отображается время.
- Если необходимо изменить режим работы, нажмите кнопку (I) для переключения между режимами стимуляции, сцеживания и массажем. Для регулировки уровня комфортного всасывания в любой момент можно нажать кнопки + —. Все режимы (стимуляция, сцеживание и массаж) регулируются от 1 до 9 уровней.

Важно! Если выделяется мало молока либо оно не выделяется вовсе, а также при болезненном сцеживании, обратитесь к врачу или консультанту по грудному вскармливанию.

Стандартное время работы устройства — 30 минут, после чего оно автоматически отключается.

Завершение работы


После завершения сцеживания отсоедините, отведя его вверх (как показано на рисунке справа).



Вылейте молоко через отверстие для слива в верхней части ёмкости для молока.

После использования разберите и очистите все детали молокоотсоса.

Чтобы открыть ёмкость для молока, потяните за насадку вниз.

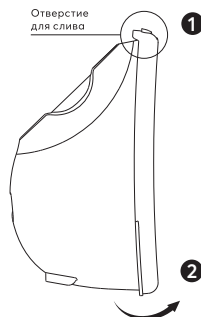

Ежедневное использование

- Перед и после использования очищайте и стерилизуйте части устройства, контактирующие с грудным молоком.
- Не погружайте основной блок и соединительные трубки в воду. Протирайте их влажной чистой тканью. Закрытый клапан изготовлен из силикона и может быстрее изнашиваться или деформироваться при длительной стерилизации при высокой температуре.
- Разбирая и собирая устройство, следуйте оригинальной инструкции. Ёмкость для молока, диафрагму, клапан и другие детали изделия можно стерилизовать (кроме электронного блока, адаптера питания и кабеля питания).
- Обратите внимание на мелкие детали, чтобы не потерять их, так как это может привести к невозможности сборки или работы устройства.
- Части молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, являются личными и не должны использоваться другими людьми.

Очистка и стерилизация

Простерилизуйте в течение 5 минут все контактирующие с грудью и грудным молоком детали молокоотсоса перед первым и перед каждым последующим использованием. Перед обработкой деталей тщательно вымойте руки.

Мойте все контактирующие с грудью и грудным молоком детали после каждого использования.

- Полностью разберите молокоотсос и позаботьтесь о мелких деталях, не теряйте и не повредите их — это может привести к потере работоспособности устройства.
- Не используйте абразивные или антибактериальные чистящие средства.
- Следите, чтобы поверхности, на которые вы кладете простерилизованные предметы, были чистыми.

Ручная мойка (перед первым использованием и после каждого применения)

Мойте детали теплой водой, используя мягкие жидкие моющие средства, предпочтительно не имеющие искусственных ароматизаторов и красителей. Тщательно промойте чистой питьевой водой.

Мойка в посудомоечной машине

Размещайте все детали, на верхней решетке. Не кладите на них другие предметы.

Кипячение в открытой посуде (перед первым использованием и один раз в день)

Доведите воду до кипения. Опустив детали, кипятите их в течение 5 минут. При кипячении не позволяйте бутылочке или другим деталям касаться боковых сторон посуды. Это может привести к необратимой деформации изделия или повреждениям. Дайте воде остыть и осторожно извлеките детали.


Микроволновая печь

Используйте пакеты для стерилизации Harry Baby в микроволновой печи согласно инструкции.




Сушка

Аккуратно поместите детали на бумажное полотенце или на подставку для сушки и дайте им высохнуть. Сухие детали поместите для хранения в чистый пакет или контейнер.

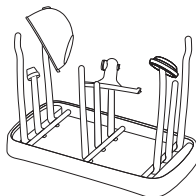

Чистка электронного блока

Для чистки устройства используйте влажные салфетки и сухую мягкую ткань.

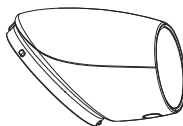

Хранение молокоотсоса

Храните изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей сухом месте, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Хранение и размораживание грудного молока

Хранение

Условия хранения	Срок хранения
Комнатная температура 16–25°C	Оптимально до 4 часов
Холодильник 4°C или ниже	Оптимально до 48 часов
Морозильная камера –18°C или ниже	Оптимально до 6 месяцев
Грудное молоко, размороженное в холодильнике	При комнатной температуре: до 2 часов. Холодильник: до 24 часов. Повторно не замораживать!

Важно! Данные по продолжительности хранения свежесцеженного грудного молока носят рекомендательный характер при соблюдении всех условий сцеживания.

- Молоко подлежит хранению, только если оно сцежено с помощью чистого и продезинфицированного молокоотсоса.
- Сцеженное молоко необходимо сразу же поместить в холодильник в наиболее холодное место.

Замораживание

- Замораживайте сцеженное грудное молоко в пластиковых бутылочках или в пакетах для хранения грудного молока.
- Заполняйте емкость только на 3/4 из-за возможного увеличения содержимого в объеме после заморозки.
- Отмечайте на этикетке дату сцеживания и объем сцеженного молока.

- Пластиковые бутылочки и составные части могут стать хрупкими в результате заморозки и разбиться при падении.
- Не используйте грудное молоко, если бутылочки или компоненты повреждены.

Внимание! Никогда не замораживайте молоко повторно. Никогда не добавляйте свежее молоко к уже замороженному.

Размораживание

Замороженное грудное молоко перед разогревом необходимо полностью разморозить.

Для сохранения полезных свойств молока размораживайте его, оставив на ночь в холодильнике.

Можно поместить бутылочку или пакет в теплую воду (не более 37°C).

Внимание! Не погружайте емкость с замороженным молоком в кипящую воду — это может привести к ее повреждению.

Нагрев и кормление

Нагрейте бутылочку или пакет для хранения с размороженным молоком в миске с горячей водой или в подогревателе для бутылочек.

Прежде чем давать молоко ребенку, всегда проверяйте его температуру.

Перед кормлением слегка взболтайте молоко, чтобы смешать в однородную консистенцию. Не встряхивайте и не перемешивайте.

Всегда выливайте остатки молока, оставшиеся после кормления.

Внимание! Никогда не нагревайте молоко в микроволновой печи, поскольку это может привести к неравномерному нагреву.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема

Способы решения

Боль при использовании

- Сделайте тёплый компресс на грудь на 5 минут перед использованием.
- Начните с уровня 1 и постепенно увеличивайте уровень, чтобы найти комфортный.
- Если проблема не решается, прекратите использование и обратитесь к специалисту.

Устройство не работает

- Если устройство не работает даже при подключении к адаптеру питания, свяжитесь с дистрибьютором или авторизованным сервисным центром.

Низкая мощность всасывания или её отсутствие

- Проверьте, правильно ли собраны все компоненты: экран для груди, силиконовая диафрагма, клапан и трубки.
- Убедитесь, что оба конца трубки надёжно вставлены в моторный блок и верхнюю крышку.
- Проверьте, не повреждён ли клапан.

Отсутствие молока при всасывании

- Расслабьтесь и убедитесь, что сосок правильно размещён в экране для груди без зазоров.
- Начните сцеживание с низкого уровня, повторяя процесс.

Зависание основного блока

- В процессе работы основной блок может зависнуть из-за вибрации или неправильной работы воздушного клапана. В таком случае слегка встряхните основной блок, чтобы он вернулся к нормальной работе.

Намокание электронный блока

- Отключите адаптер питания от розетки. Выключите электронный блок нажав кнопку «вкл/выкл». Поместите устройство в сухое теплое место на 24 часа.

Примечание. Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей. Не пытайтесь ускорить процесс сушки, применяя источники тепла.

Молокоотсос с трудом снимается с груди

- Уменьшите мощность всасывания в настройках устройства.

На молокоотсосе появились царапины

- Появление неглубоких царапин при нормальном использовании — это обычное явление, которое не вызывает проблем. Не используйте абразивные или антибактериальные моющие средства, так как они могут вызвать серьезное повреждение пластика.

Элементы устройства поменяли цвет

- Изменение цвета может произойти под воздействием прямых солнечных лучей, перепада температур или под воздействием пищевых красителей. Вы можете по-прежнему использовать устройство.

Гарантийный талон

Сохраняйте гарантийный талон и обращайтесь к продавцу при возникновении проблем с качеством.

Изделие	
Дата изготовления изделия (указано на упаковке)	
Название и адрес торговой организации	
Дата приобретения	
Печать фирмы продавца	

Изделие получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 1 год с момента совершения покупки. Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного изделия вместе с правильно заполненным талоном.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- Расходные элементы и материалы (картриджи, аккумуляторные источники питания, батареи и т.п.);
- Зарядные устройства;
- Естественно, изнашиваемые в процессе эксплуатации части: ножи, мембраны сменные фильтры, насадки, трубки и т.д.;
- Повреждения, возникшие из-за подключения в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации;
- Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- Повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи.

Артикул: 22013
(модель HL-3060)

Товар соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016.





happybaby.ru