

Breast pump adapter



Переходник
для молокоотсоса


1



Инструкция по применению


Отсоедините электронный блок (C)
от емкости (B), отсоедините диафрагму (A)
от электронного блока.

2

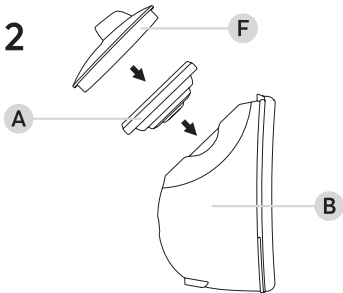

Вставьте диафрагму (А) в верхнюю часть емкости (В) и поверх установите переходник (F).

3

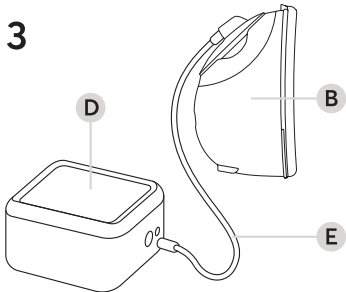

Соедините емкость молока (B) и альтернативный электронный блок (D) с помощью соединительной трубки (E).

Уход и хранение

Вымыть перед первым и последующим использованием. Мыть теплой водой с мылом или в посудомоечной машине, тщательно ополаскивать. Сушить при комнатной температуре. Не разогревать в СВЧ. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы. Рекомендуется менять переходник при появлении повреждений. Внимательно прочтите инструкцию. Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя.

Не является игрушкой. Храните в месте, недоступном для детей.



happybaby.ru